

MANTENIMIENTO

- *Se sugiere que cada vez haga limpieza general de las partes metálicas y tapicería de su Silla.
- *Para mantener la apariencia de su tapicería en buen estado es necesario limpiarla regularmente.
- *Pequeñas cantidades de polvo pueden ser removidas de su tapicería con un trapo o esponja húmedos con jabón suave y agua tibia y con movimientos suaves. Enjuague con agua limpia y después seque.
- *Para lavar y secar su tapicería no utilice la lavadora ni la secadora, si esta muy sucia deberá utilizar un cepillo de cerdas suaves para limpiarla y un trapo semi-húmedo para secarla.
- *Las partes esmaltadas y/o cromadas de su Silla de Ruedas deberán limpiarse de manera regular con un limpiador no abrasivo y posteriormente se aconseja pulir con una cera no abrasiva, especial para el esmalte o cromo.

CONSEJOS DE SEGURIDAD

- *La ingeniería y la construcción de las Sillas Activ han sido diseñadas para proveer el máximo de seguridad del Usuario.
- *Los estándares de seguridad internacional que se encuentran actualmente vigentes han quedado cubiertos de manera satisfactoria y en algunos casos han sido excedidos.
- *Sin embargo el propio Usuario puede poner en riesgo su seguridad al utilizar su Silla de Ruedas de manera indebida.
- *Por su propia seguridad las siguientes reglas y medidas de seguridad deben ser muy bien entendidas por el Usuario.
- *Cualquier adaptación reparación o ajuste que se le haga a su Silla de Ruedas por alguna persona que no sea un profesional puede incrementar el riesgo de accidentes.
- *Ud. deberá utilizar siempre ropa de colores claros cuando está oscuro, eso permitirá que pueda ser visto fácilmente.
- *Familiarícese con su Silla de Ruedas, sea cuidadoso sobre todo la primera vez que la utiliza.
- *Practique utilizando su Silla de Ruedas en subidas y bajadas.
- *No trate de recoger objetos si los tiene que levantar desde el piso bajando entre sus rodillas.
- *No trate de alcanzar objetos si para recogerlos tiene que agacharse hacia adelante.
- *No transite su Silla de Ruedas por caminos empedrados, calles, avenidas o en subidas/bajadas cuando la superficie esté mojada, congelada o con aceite.
- *Utilice sólo refacciones y accesorios originales.
- *No se pare sobre el Chasis de su Silla de Ruedas.

*No utilice los descansapiés como plataforma cuando intente ponerse de pie para salir de su Silla de Ruedas.

TRASLADANDO SU SILLA DE RUEDAS

Para llevar su Silla de Ruedas de un nivel a otro, siempre utilice elevadores o rampas, si estos no están disponibles, solicite la asistencia de dos personas, quienes deberán sujetar la Silla firmemente de las partes fijas de su equipo. La Silla de Ruedas nunca deberá ser levantada por su ocupante, está sólo puede ser empujada.

REVISIONES PERIÓDICAS

Una revisión periódica de los puntos que a continuación se mencionan le ayudarán a mantener la vida y la eficiencia en su Silla de Ruedas.

SEMANALMENTE

- *Checar la presión de las ruedas.
- *Checar que el tornillo en la cruceta central de la silla este con la tuerca apretada y en buenas condiciones.
- *Limpiar la tapicería con agua jabonosa o productos adecuados para ello.
- *Limpiar las partes metálicas de la Silla con un trapo seco o con productos que sean especiales para acabado cromado o superficies esmaltadas.
- *Checar los frenos de las ruedas y ajustar si es necesario.
- *Checar el desgaste en las llantas traseras y delanteras.

TRIMESTRALMENTE

- *Checar y ajustar solamente si es necesario: el rodado de las llantas, girar cada una y verificar que se mueven sin dificultad.
- *Lubricar con aceite industrial o grasa todas las partes expuestas a fricción o desgaste.
- *Apretar tuercas y tornillos.
- *Una revisión general de la condición de la Silla y reparar cualquier detalle si fuera necesario.

ANUALMENTE

- *Recomendamos una revisión general hecha por algún Distribuidor Autorizado **ReActiv**.

Para mayor información acerca de este producto de calidad **ReActiv** sírvase de contactar a su Distribuidor Autorizado más cercano:

Distribuidor Autorizado

MANUAL DE USUARIO SILLAS DE RUEDAS

Activ2
by **ReActiv**



www.reactiv.com.mx