



REActiv



Silla Cómodo de Acero con Ruedas, Asiento, Cubeta, Tapa y Brazos Abatibles, Gris

R219039

MANUAL DE USO E INSTALACIÓN

Gracias por elegir la Silla Cómodo ReActiv para Baño, estamos seguros de que este Producto cumplirá con sus necesidades de seguridad y ayuda dentro del área de baño.

Antes de hacer uso de su Cómodo lea cuidadosamente este manual. Si tiene dudas acerca de su uso contáctese a su Distribuidor Autorizado ReActiv quién podrá ampliar la información.

INSTALACIÓN

- Verifique que su Producto y piezas están en perfecto estado.
- Remueva todo el plástico que la protege y deséchelo.
- Instale las cuatro patas del Cómodo colocando el asiento boca abajo e inserte las patas ajustando la altura de las mismas con el botón a presión ubicado en cada una.
- Descanse el Cómodo con el frente al suelo e inserte el respaldo en los orificios ubicados en la parte trasera, verifique que los botones a presión queden insertados en los orificios bajo el cómodo.
- Coloque el Cómodo en una superficie plana y levante el asiento para instalar la cubeta, cuando se utilice sobre un inodoro reemplace la cubeta por la guarda anti-splash.
- Para bajar los descansabrazos presione el botón rojo ubicado en los laterales al mismo tiempo que los empuja hacia abajo. Para subirlos levántelos hasta que el botón rojo sobresalga nuevamente y el descansabrazo quede fijo.
- La altura del Cómodo debe permitirle al Usuario tocar el suelo con sus pies mientras esta sentado, pero suficientemente alto para facilitar que se siente y levante.
- Después de su uso remueva la cubeta, tire los deshechos y desinfecte.

Su Cómodo para Baño ReActiv está garantizado por 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta Garantía* cubre cualquier defecto de Fabricación y Funcionamiento, así como imperfecciones de Materiales y Mano de Obra. La Garantía NO CUBRE defectos ocasionados por Mal Uso, Abuso, Negligencia u Operación Inapropiada fuera de las Especificaciones del Producto.

*Aplican Restricciones, favor de consultar Nuestra Tabla de Garantía Limitada en nuestro sitio web: www.reactiv.com.mx