



Silla Cómodo Ducha de Aluminio, con ruedas, acojinado

R219091


MANUAL DE USO E INSTALACIÓN

Gracias por elegir la Silla Cómodo ReActiv para Baño, estamos seguros de que este Producto cumplirá con sus necesidades de seguridad y ayuda dentro del área de baño.

Antes de hacer uso de su Cómodo lea cuidadosamente este manual. Si tiene dudas acerca de su uso contáctese a su Distribuidor Autorizado ReActiv quién podrá ampliar la información.

INSTALACIÓN

- Asegúrese que todas las piezas estén completas:
Chasis con asiento, cubeta con tapa, respaldo, tapicería para respaldo, 4 tornillos , 4 arandelas y 4 tuercas.
- En el extremo posterior de la silla donde los brazos se inclinan localice los 4 orificios para poner los tornillos, 2 en cada lado del marco. Deslice los 4 tornillos a través del respaldo y el chasis como se muestra en la figura 1. En el extremo del tornillo, deslice las 4 arandelas y apriete las 4 tuercas como se muestra en la figura 2.

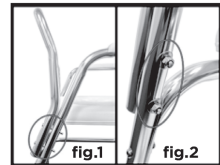

- Ponga la tapicería en el respaldo.
- Ahora deslice la cubeta por debajo del asiento por el lado izquierdo, hasta que la cubeta golpee el parachoques de goma en el otro extremo del asiento.



Su Cómodo para Baño ReActiv está garantizado por 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta Garantía* cubre cualquier defecto de Fabricación y Funcionamiento, así como imperfecciones de Materiales y Mano de Obra. La Garantía NO CUBRE defectos ocasionados por Mal Uso, Abuso, Negligencia u Operación Inapropiada fuera de las Especificaciones del Producto.

*Aplican Restricciones, favor de consultar Nuestra Tabla de Garantía Limitada en nuestro sitio web: www.reactiv.com.mx