



CAMA HOSPITALARIA MANUAL CON BLOQUEO CENTRAL



softcare
by **ReActiv**



Nota: La apariencia de los productos descritos en este manual puede ser diferente de los productos terminados. Esto no afectará el rendimiento de su producto.

Introducción

Lea atentamente las instrucciones, ya que brindan información importante sobre (**seguridad durante los procedimientos de uso y mantenimiento**). Los gráficos e imágenes contenidas en este manual son ilustrativas y puede haber cambios en los productos.

Usos

La cama se puede utilizar principalmente en clínicas, hospitales y en casa.

Características

- 1. La cabecera y la piesera están fabricados en ABS .
- 2. Barandales laterales de aluminio abatibles.
- 3. Mediante las manijas puede ajustar la inclinación de las secciones de pies y espalda.
- 4. Marco de la cama fabricado con tubos rectangulares de acero.
- 5. Ruedas de 5” con freno de pedal.
- 6. Portavenoclisis doble.
- 7. Portabolsa para recolección de fluidos.

Parámetros técnicos

Producto	R221011
Ángulo de inclinación del respaldo	0°-75°(± 10°)
Ángulo de inclinación del reposapiés	0°-35°(±10°)

Guía de instalación

Por temas de embalaje, el producto no viene completamente armado. Es posible que deba instalar la cabecera y piecero y también las ruedas.


Lea atentamente esta manual y siga estrictamente los pasos.

Nota: Asegúrese de que la cama esté completamente instalada antes de ponerla en uso.

Las piezas deben prepararse antes de la instalación:

 2 piezas	 2 piezas
 2 piezas	 4 piezas

Paso 1: Instalación de los postes de acción.

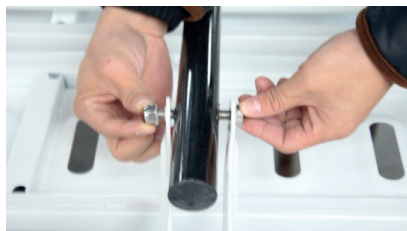


Paso 2: Instale el gancho de drenaje.


Imágenes 1-2

Instale el gancho de drenaje girándolo sobre el orificio en el marco de la cama. Se montan a ambos lados de la cama.



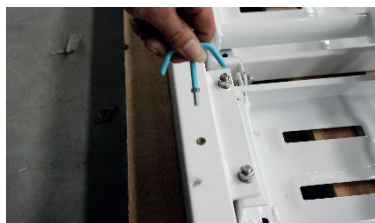

1

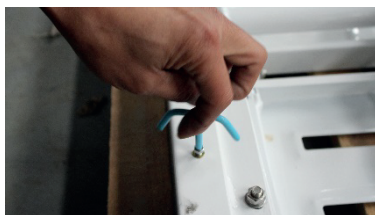

2

Paso 3: instale los barandales.

Imágenes 1 a 5.

Coloque los barandales en los dos orificios laterales del marco de la cama y sostengalo con los tornillos. Asegúrese de que queden bien apretados.



1




2



3



4

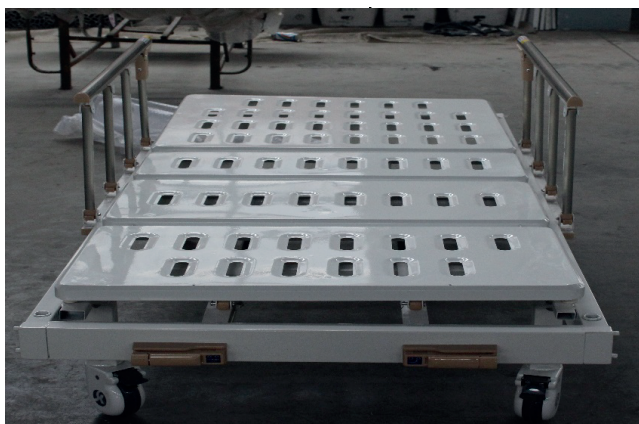

5

Instale la cabecera y piecera de la cama.

Imágenes 1 a 3.


Hay dos ganchos en ambos lados de la cabecera, engánchelos a las columnas de acero. Cubra la columna de acero, bajando el gancho para asegurarla al panel **¡¡¡¡¡IMPORTANTE!!!**



1



2

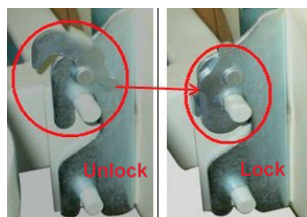

3

Ruedas:

Si su cama está equipada con ruedas, puede moverla con / sin Usuario en la cama.

Nota: Bloquee las ruedas cuando la cama este ubicada en su lugar. Su cama está equipada con ruedas de 5 "controladas centralmente, hay un gran freno de pedal en su cama. (Figura 4)
Pise el pedal para bloquear las 4 ruedas; levante el pedal para desbloquear las 4 ruedas.

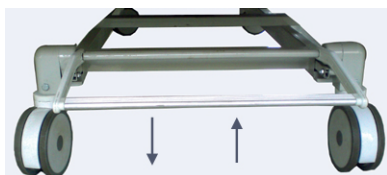


Figura 4

Manivelas:

Las manivelas funcionan para activar el respaldo y el área de los pies, para elevarlos o bajarlos.



Portavenoclisis:

Coloque el portavenoclisis en el orificio. Si desea ajustar la altura gire la perilla (C) y tire del extremo (B) hacia arriba para que sea más alto, y luego vuelva a girar la perilla (C) en el sentido de las manecillas del reloj para asegurarlo y coloque la bolsa de infusión en el punto A.

Figura 3



Figura 3

Notas

Los operadores deben leer este manual cuidadosamente, seguir las instrucciones y familiarizarse con los procedimientos correctos de operación y mantenimiento del producto.

Al transferir a los Usuarios, asegúrese de bloquear los barandales.

ReActiv no se hace responsable de los daños que se puedan ocasionar por mal uso.

Advertencia y precaución

No permita que este producto sea operado por niños pequeños.

Cuando se utilice las manivelas, siempre asegúrese de que el Usuario esté posicionado adecuadamente en la cama. No deje que las extremidades cuelguen por un lado o entre los barandales de la cama al realizar cualquier función.

Al utilizar un equipo de administración de tipo nasal, máscara de oxígeno o tubos de aire asegúrese de que estén correctamente ubicados alrededor de la cama y evitar algún accidente o mal funcionamiento de los mismos.

Mantenimiento

Limpie su cama constantemente.

Compruebe si hay alguna pieza suelta o desgastada.

Almacenamiento

Almacene su cama en lugares no húmedos.

Garantía

La garantía es de un año a partir de la fecha de entrega.

Cualquier defecto encontrado debe ser notificado a su Distribuidor Autorizado ReActiv o Ejecutivo de ventas de inmediato.

La garantía no incluye los siguientes costos adicionales:

Flete, embalaje, mano de obra o todo tipo de gastos a cargo de los clientes.

La garantía no se aplica a:

- Daños durante el transporte
- Reparaciones por personal y centros de servicio no autorizados.
- Piezas con desgaste normal
- Daño causado por mal uso
- Modificación o cambio de productos
- Todos los gastos no cubiertos por la garantía del contrato o la garantía legal, especialmente los causados por la no utilización.
- No hay extensión de garantía a menos que se especifique lo contrario

