

Plegoö
by ReActiv



ReActiv[®]

ReActivando tu Salud!

Manual de usuario



Andadera Rollator Plegoö Travel

DE ALUMINIO CON DESCANSAPIÉS

CON RUEDAS DE 8"

R223054/55

ÍNDICE

1.- Introducción	3
2.- Descripción de partes.....	4
3.- Instrucciones de ensamble.....	5
4.- Especificaciones.....	5
5.- Tips de seguridad	7
6.- Garantía	8

1. Introducción

Nuestra andadera de aluminio de doble función es ideal para el uso diario. Se puede utilizar tanto en interiores como en exteriores. Su diseño ligero ofrece un transporte fácil y el robusto marco de aluminio brinda estabilidad y soporte cuando está en uso.

La andadera viene con neumáticos negros de alta calidad a prueba de pinchaduras. También se han incluido excelentes características, empuñaduras ergonómicas y frenos de mano con cable de bloqueo, fáciles de usar para personas con artritis. Su diseño plegable y compacto hacen que este producto sea fácil de transportar y almacenar, también cuenta con varios ajustes de altura para garantizar su adaptabilidad a cada persona.

Nuestros productos siempre se fabrican con los más altos estándares de calidad y cuentan con el marcado CE que cumple con todos los requisitos necesarios según la legislación europea para dispositivos médicos.


2.- Descripción de partes



3.- Instrucciones de ensamble

Siga estos sencillos pasos para armar:

1. Abra el marco principal hasta que el asiento se haya bloqueado en su posición, según la imagen a continuación. Luego, coloque el marco principal del andador en una superficie sólida y plana.

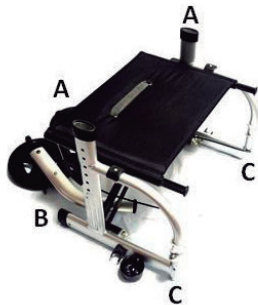


2. Inserte las dos secciones de las manijas de altura ajustable, en el marco principal marcado con "A" en la imagen. Asegúrese de que el botón de ajuste se haya bloqueado en su posición con la configuración de altura preferida.



3. Inserte las dos ruedas de freno traseras en el cuadro principal marcado en “B” en la imagen. Asegúrese de que el botón de presión se haya bloqueado en su posición de forma segura.



4. Inserte las dos ruedas delanteras en el cuadro principal marcado con “C” y luego gire la perilla de estrella que se muestra en la imagen en sentido horario hasta que encaje en su posición. Asegúrese de que el tornillo esté completamente asegurado y que no esté flojo.

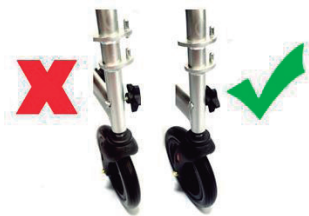

5. Finalmente, fije los reposapiés provistos en la parte delantera del marco y el ensamble estará completo.

4.- Especificaciones

Marco de aluminio ultraligero

Diseño plegable y compacto

Soporte máximo de 136kg

Incluye bolsa portaobjetos

NW 8.5 Kg / GW 9.5 Kg

Dimensiones (en centímetros) – Largo = 100 / Ancho = 65

5.- Tips de seguridad

- Es importante mantenerse atento en todo momento al usar la andadera, especialmente al caminar en terrenos inclinados, o con obstáculos y al eludir o superar escalones o bordes.
- Seleccione su ruta con cuidado para evitar un terreno irregular o blando siempre que sea posible. No use la andadera en una pendiente si está cubierto de nieve, hielo, charcos con agua o aceite.
- No debe realizar adaptaciones o cambios no autorizados en su andadera, ya que esto puede provocar que se vuelva inestable. Practique en terrenos regulares, así como subir y bajar colinas lentamente.
- Solo una persona puede usar el andador en uso normal. Nunca se pare en el marco, el asiento o las ruedas cuando esté en uso.
- Un trabajo de adaptación o ajuste no profesional o incorrecto podría aumentar el riesgo de accidentes. Los usuarios pueden ponerse en riesgo al usar incorrectamente su andadera.

-
- Los frenos de mano deben usarse para reducir la velocidad del andador cuando está en uso. Recuerde siempre aplicar los frenos de mano cuando esté parado, excepto cuando guarde el andador por largos períodos de tiempo ya que esto podría dañar o estirar los cables del freno.
 - Si la andadera tiene daños o necesita ser reparada entonces no la utilice.
 - Siempre asegúrese de ensamblar completamente y revisar cuidadosamente su andador, antes de usarlo.

6.- Garantía

Existe una garantía integral de doce meses a partir de la fecha de entrega de su andadera. La garantía cubre reparaciones o reemplazo durante este período, esta garantía no es transferible. Si alguna parte del producto requiere reparación o reemplazo completo como resultado de un defecto de fabricación o material dentro del período de garantía, las partes se suministrarán sin cargo. La garantía excluye las llantas y todos los artículos que hayan sido sometidos a un uso indebido según a las recomendaciones del manual de usuario. En circunstancias normales, no se asumirá ninguna responsabilidad cuando el producto no se haya mantenido de acuerdo con las recomendaciones del fabricante. Las condiciones de garantía anteriores solo se aplican a productos nuevos.



ReActivMxOficial



www.reactiv.mx