

Silla Cómodo Ducha ReActiv de Aluminio con Respaldo Desmontable



Código: R204104-R

Contenido:

Chasis	1 pza.
Respaldo	1 pza.
Cubeta con Tapadera y Salpicadera	3 pzas.
Tapas de WC	1 pza.

Revisar que el contenido de la caja este completo y en perfecto estado.

Instrucciones de Ensamble de Respaldo

- 1 Una vez que haya retirado el Chasis del empaque, coloquelo sobre una superficie plana.
- 2 Sobreponga el Chasis e inserte los tubos conectores izquierdos y derechos del Respaldo.
- 3 Presione el botón de los tubos conectores y embone en el orificio del Chasis.
- 4 Ajuste la altura de su preferencia acomodando los botones.

Instrucciones de Ensamble de la Cubeta

- 1 Inserte el lado delgado de la Cubeta hacia el tubo que da al respaldo y presione hasta embonar como se muestra en el Gráfico 1.

Instrucciones de Ensamble de la Tapadera de WC

- 1 Inserte la Tapadera de WC por encima de la cubeta en el tubo de lado de el respaldo, como se muestra en el Gráfico 2.

Gráfico 1

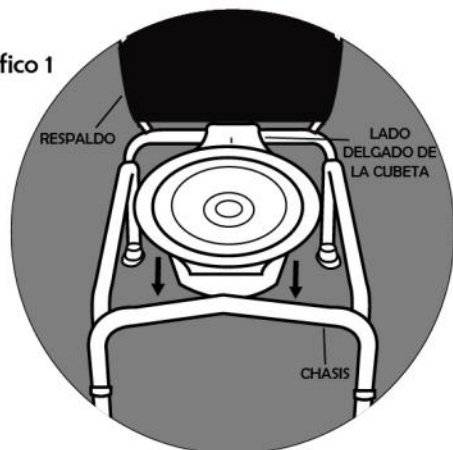


Gráfico 2

