



MANUAL DE USUARIO

**ELEVADOR DE PACIENTES
HIDRÁULICO**

**ELEVADOR DE PACIENTES
ELÉCTRICO**

CONTENIDO

- **Introducción**
- **Notas especiales**
- **Precauciones**
- **Procedimiento de manejo**
- **Instrucciones de ensamble**
- **Instrucciones de manejo**
- **Cuidados y mantenimiento**
- **Calendario de mantenimiento**
- **Solución de problemas**
- **Limitaciones de Garantía**

INTRODUCCIÓN

Gracias por adquirir su Elevador de Pacientes **ReActiv**. Las siguientes paginas le proveerán información importante sobre seguridad e instrucciones de manejo para el uso de su Elevador de Pacientes, arnés y accesorios, así como el mantenimiento y garantía. Lea este manual cuidadosamente antes de operar su Elevador de Pacientes.

No intente ninguna transferencia sin la previa aprobación medica del paciente. Seleccione el arnés que mejor ayude a sus necesidades, habilidades, confort y seguridad a la persona que será transferida.

Antes de colocar al paciente en el Elevador y antes de cada uso revise cuidadosamente que ningún elemento se encuentre dañado, si no se encuentran partes rotas o perdidas, todos los ascensos del paciente deben ser en un lugar adecuado, etc. Reemplace inmediatamente cualquier componente que se encuentre dañado o roto. Su Elevador de Pacientes tiene que ser cuidado y tenerlo en mantenimiento constante por personal capacitado.

Antes de utilizar su Elevador de Pacientes lea rigurosamente las instrucciones en este manual. El operador debe practicar varias veces el funcionamiento del producto antes de elevar a un paciente. Es extremadamente importante el saber como se siente el paciente cuando esta siendo ascendido. Nosotros sugerimos que el operador intente varios levantamientos con arnés y como operar el equipo hasta que se encuentre confiado como para elevar a un paciente. El proceso de elevación debe ser explicado al paciente previo a subirlo al Elevador.

Esta guía cubre el uso del Elevador de Pacientes Hidráulico y Eléctrico. Tome en cuenta que las precauciones básicas y los procedimientos incluidos en este manual son para usarlos como guía solamente.

NOTA: Antes de intentar instalar su Elevador de Pacientes consulte la sección de “Instrucciones de ensamble” contenidas en este manual.

NOTAS IMPORTANTES

PRECAUCION: No opere el Elevador sin haber leído y comprendido este manual. Si es incapaz de entender las advertencias, precauciones e instrucciones contacte a su distribuidor antes de intentar utilizar este equipo. Las fallas ocasionadas por el mal uso pueden terminar ocasionando algún daño al paciente.

ADVERTENCIA: Los avisos de emergencia utilizados en este manual aplican a los peligros o a practicas inseguras que pueden terminar dañando al paciente.

PRECAUCION: Los avisos de precaución utilizados en este manual aplican a los peligros o a practicas inseguras que pueden terminar dañando al paciente.

NOTA: Las notas con relieve contienen información que ayudará al operador a entender la información contenida en este manual.

En este manual la persona que va a utilizar el Elevador es referida como paciente u y la persona que operará el ascenso del paciente es llamado operador o asistente.

Guarde estas instrucciones y téngalas consigo cada vez que vaya a utilizar su Elevador de Pacientes.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

Importante: Antes de elevar a cualquier paciente lea las siguientes precauciones y advertencias por su seguridad. Cualquier falla o mal funcionamiento podría ocasionar un accidente.

Siempre consulte a un profesional para determinar métodos seguros más adecuados para sus capacidades individuales.

Protéjase, el mantenimiento de su Elevador de Pacientes debe ser atendido por un profesional cada cierto tiempo.

ADVERTENCIAS

1. Revise que todas las partes de su Elevador de Pacientes se encuentren en perfecto estado, en caso de no estarlo **NO UTILICE EL EQUIPO** y consulte a su Distribuidor Autorizado.
2. El paciente podría caerse si se asciende de forma inadecuada. Lea las instrucciones perfectamente antes de elevarlo.
3. Cuando este transfiriendo a algún paciente mantengalo siempre en el centro de la base.
4. Este Elevador de Pacientes esta diseñado solamente para transferencias.
NO LO UTILICE PARA TRANSPORTAR A UN PACIENTE DE UN LUGAR A OTRO
5. El peso máximo que soporta el Elevador es de 180 Kg.
6. Asegúrese de que todos los lazos del Arnes están correctamente colocados a los ganchos del Elevador para evitar que el paciente vaya a deslizarse o caerse y así evitar accidentes. Nunca utilice el Elevador para transportar otras cosas que no sea a una persona.
7. No coloque los seguros de las ruedas cuando este elevando al paciente. Las ruedas deben quedar libres para permitir que el paciente se estabilice cuando es trasferido a una Silla, Cama o a un objeto estacionario.
8. Para asegurar la estabilidad durante transferencia el paciente deberá levantar las piernas bloqueando la posición de apertura máxima.
9. Reemplace cualquier parte fracturada o dañada inmediatamente, algún corte o desgarro en el Arnes puede ocasionar un accidente. Utilice arneses que se encuentren en buenas condiciones.

10. Una modificación no autorizada del Elevador de Pacientes, utilizar partes ajenas de reemplazo o cambiar la estructura del Elevador de cualquier forma, anularán la validez de su Garantía y puede ocasionar daños serios en su equipo.

11. SOLO PARA PACIENTES CON ELEVADOR HIDRAULICO:

La bomba hidráulica es sellada en la fabrica. Si requiere servicio la Unidad debe ser devuelta a su Distribuidor Autorizado para su reparación. NO intente abrir la bomba hidráulica utilizando un servicio local, esto anulará la Garantía de su producto y puede dañar su Unidad.


12. SOLO PARA PACIENTES CON ELEVADOR ELÉCTRICO:

Las partes eléctricas no contienen componentes que necesiten servicio. Si el servicio es requerido la Unidad debe ser devuelta a su Distribuidor Autorizado para su revisión. No intente arreglar las partes eléctricas en un servicio local, esto anulará la Garantía de su producto y puede dañar su Unidad.

13. Utilice un Arnes a la medida y necesidad del Usuario.

14. Use precauciones extremas y el sentido común al elevar a un paciente, preste especial atención a los pacientes que se encuentren desorientados y no puedan cooperar cuando estén siendo transferidos, como una persona en coma, agitada, espasmica o con insuficiencia mental.

PARTES DEL ELEVADOR

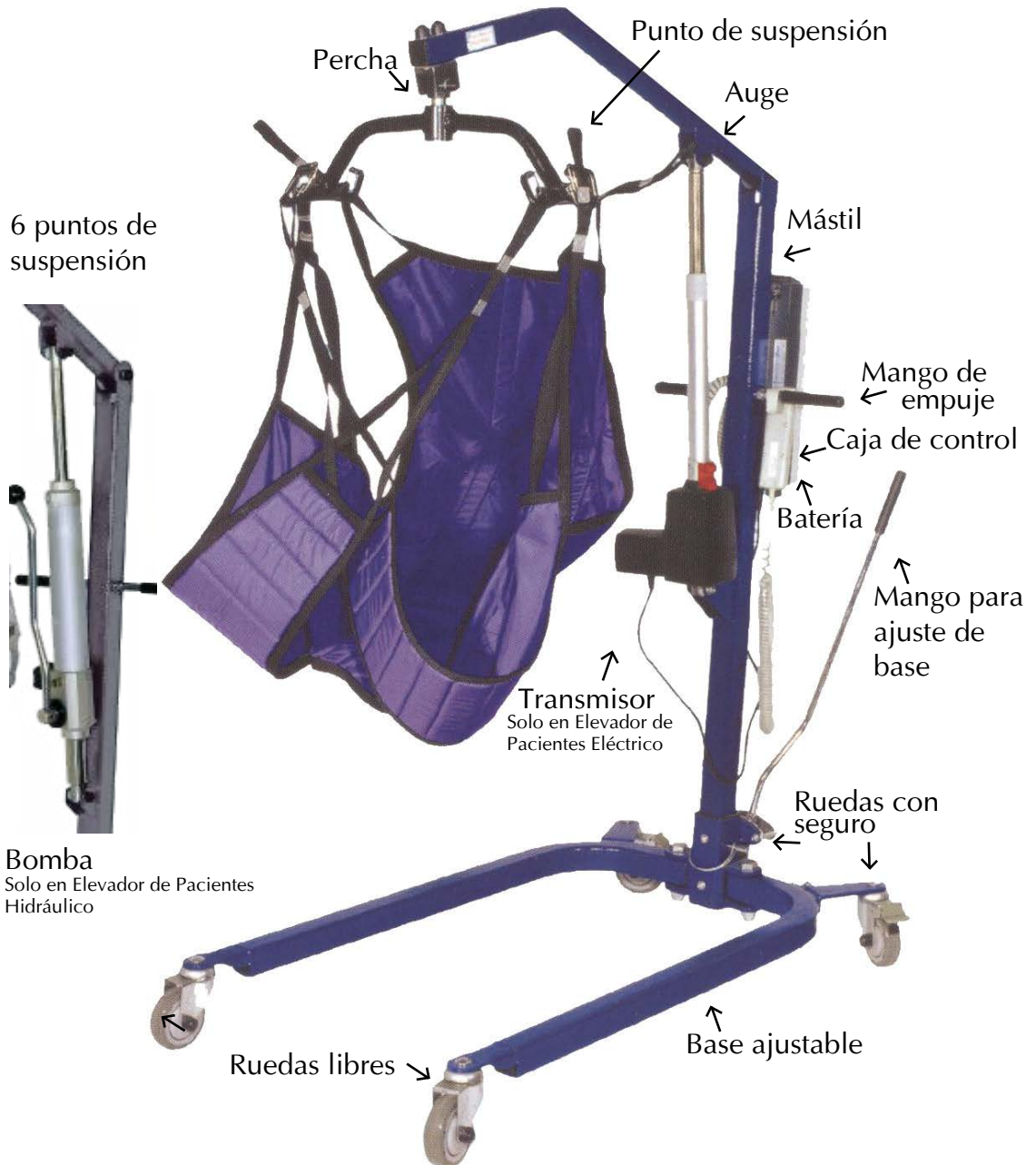

ENVÍO Y TRANSPORTE

INSTRUCCIONES DE ENVÍO Y TRANSPORTE

Si el elevador de pacientes va a ser enviado por transporte público, debe ser empacado en el mismo cartón en el cual fue recibido.

DESEMPACANDO

- 1.- Verifique si existe algún daño a la vista en el cartón o en su contenido, si el daño es evidente notifique a su transportista.
- 2.- Remueva todo el embalaje suelto de la caja.
- 3.- Cuidadosamente remueva los componentes del elevador de la caja.

NOTA: Le recomendamos conservar el empaque original de su Elevador de Pacientes hasta que vaya a ser utilizado.


REVISIÓN

- 1.- Es recomendable revisar su Elevador de Pacientes una vez retirado de su empaque original para verificar que no contenga daños mayores en su estructura.
- 2.- Revise cuidadosamente todos los componentes.

ALMACENAMIENTO


- 1.- Almacene su Elevador de Pacientes en un área seca y en su empaque original.
- 2.- No coloque otros objetos sobre la caja del elevador cuando este empacado.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

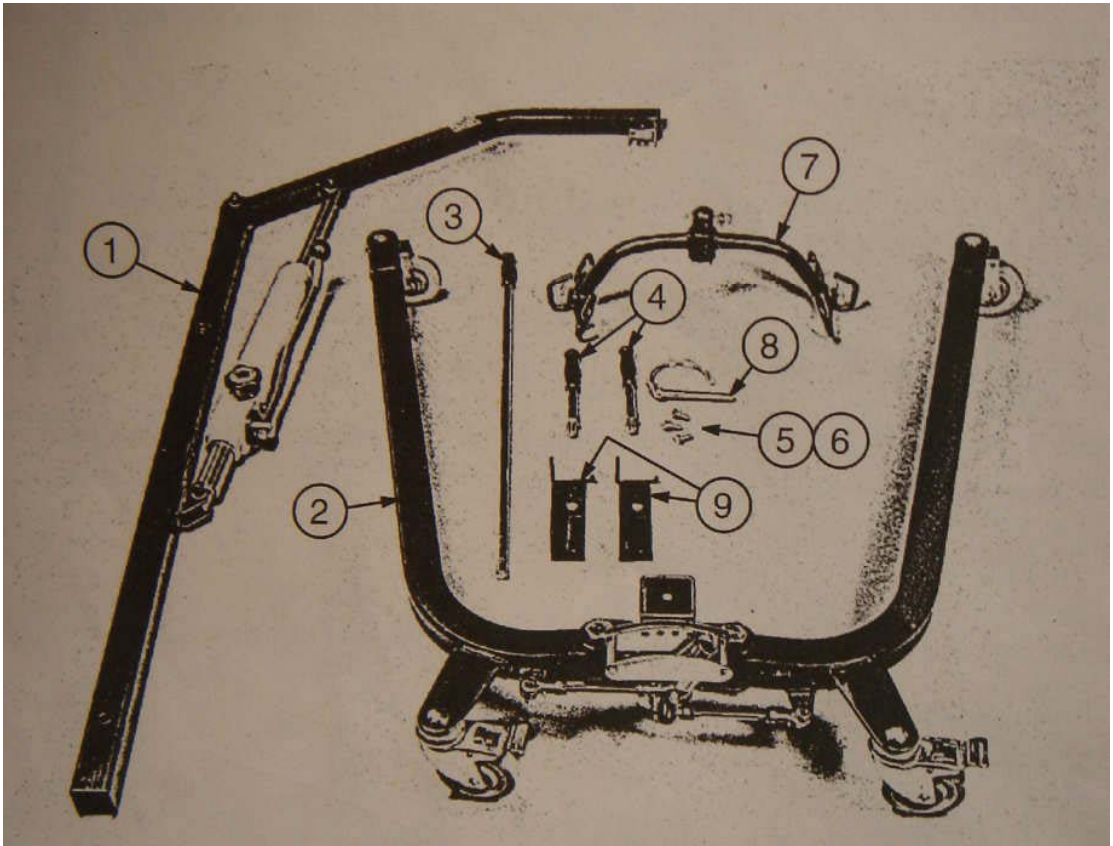

- 1) 1 Mástil / Auge / Ensamblaje de Bomba (Solo Elevador Hidráulico)
1 Mástil / Auge / Ensamblaje del transmisor (Solo Elevador Eléctrico)
- 2) 1 Base
- 3) 1 Mango de ajuste de la Base
- 4) 2 Mango de Empuje
- 5) 2 Pernos para la fijación del mango
- 6) 1 Palanca de ajuste para asegurar la base
- 7) 8 Perchas
- 8) 1 Pasador de seguridad
- 9) 2 Insertos de L

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

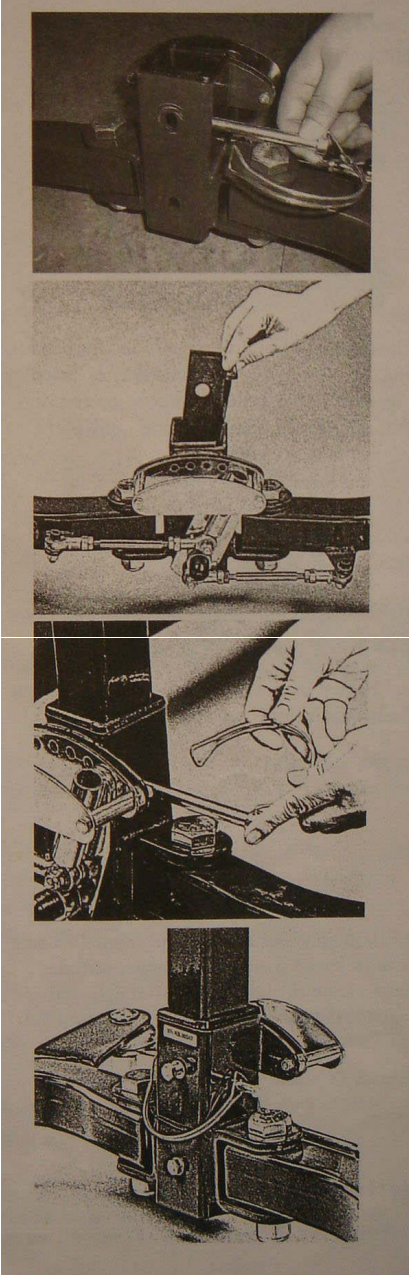

1.-Remueva el seguro de la funda del mástil localizado cerca de la base.

2.- Instale los insertos L en la base


3.- Con el auge apuntando hacia la misma dirección de la base inserte el mástil en la funda.

4.- Inserte el pasador de seguridad a través de los agujeros de la funda y el mástil, conecte el cable de bloqueo hacia el final de la espiga.


5.- Atornille los 2 tornillos de fijación al mástil en los orificios de la funda de la base.




6.- Atornille las manijas en el mástil y apriete las tuercas.

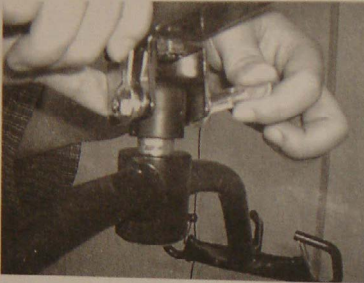

7.- Quite el tornillo de la parte superior de la barra de separación, teniendo cuidado de no dejar caer junto con el pasador. Instale la barra de separación con el soporte en forma de U en el extremo de la pluma. Alinee los agujeros, inserte el perno y apriete.

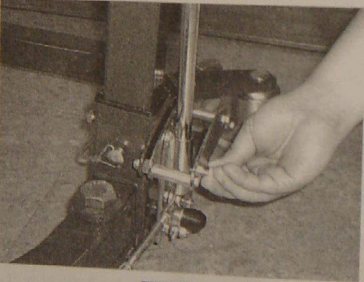

8.- Instale el controlador de ajuste de la base en el zócalo situado detrás de la funda del mástil en la base. Con la funda de la base colocada en el extremo derecho apriete el tornillo para fijar y asegurar que el mango esta firmemente adherido a la base.

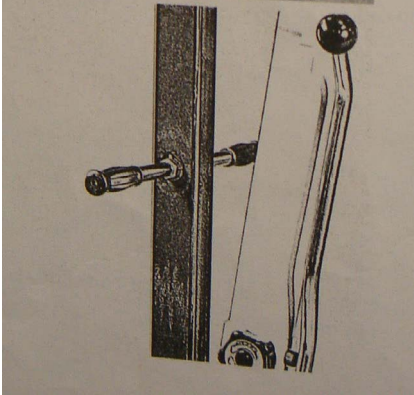

9.- Para fines de envío coloque el elevador en su posición mas baja. Para elevarlo gire la perilla de la bomba en sentido de las agujas del reloj, que quede apretado y opere la manija de la bomba.

NOTA: Los pasos del 10-13 aplican solamente para el Elevador de Pacientes Eléctrico.

10.- Coloque la caja de control con tapón de rosca 5MM.

11.- Conecte el cargador de la batería usando un tapón de rosca 5MM.

12.- Conecte la batería a la unidad.

13.- Consulte la sección de Conexiones Eléctricas incluida en este manual.

CONEXIONES ELÉCTRICAS

La caja de control es el corazón del sistema eléctrico, asegúrese que todos los cables están conectados firmemente en los orificios apropiados.

Estando de pie detrás del Elevador de Pacientes, la conexión del control manual se encuentra en el extremo derecho del arco del control. Asegúrese que las marcas de la caja de control y la conexión del control manual están alineadas e inserte firmemente el tapón del control manual.

A la derecha del control manual se encuentra la conexión al motor. Inserte el control manual firmemente en su receptor (esta conexión no es necesaria alinearla).

CARGANDO LA BATERÍA (Elevador de Pacientes Eléctrico)

Cuando la batería del Elevador de Pacientes esta en uso y se encuentre al 50% de su capacidad se escuchará una alarma que avisa que la batería se encuentra en este porcentaje y necesita ser cargada.

NOTA: El Elevador de Pacientes utiliza una batería de ácido de plomo. Cargue totalmente la batería antes de usar por primera vez su Elevador. Para incrementar la vida de la batería mantengala completamente cargada aun cuando no este en uso. El tiempo aproximado de carga de la batería es de 4 horas.

Es necesario recargar la batería de su Elevador de Pacientes por lo menos una vez por semana aun cuando el producto no esté en uso para evitar que pierda su carga.

ADVERTENCIA: Después de que suene la alarma aun queda suficiente batería para elevar al paciente. Tenga cuidado si esta descendiendo asegúrese que no se descargue la batería en pleno proceso. Refiérase a la sección de **PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA** siguiendo la operación de cuando se descarga la batería.

CARGAR LA BATERÍA CON EL ELEVADOR MONTADO EN EL CARGADOR DE LA BATERÍA

Con la carga del control y el cargador de la batería instalado, inserte el cargador en una toma de corriente de 110V-240V. Una luz verde significa encendido y una luz amarilla significa que la batería se esta cargando. Cuando la batería esta completamente cargada se apagará la luz amarilla. El elevador esta listo para usarse.

CARGA DE LA BATERÍA CON EL CARGADOR MONTADO EN LA PARED

Remueva la batería de su soporte en el Elevador colocando su mano sobre la batería, coloque sus dedos detrás de la batería y jale hacia arriba la manija de metal.

Jale la batería hacia arriba para removerla. Coloque la batería en la parte superior del cargador montado en la pared.

Una luz verde significa encendido y una luz amarilla significa que la batería se esta cargando. Cuando la batería este complemente cargada coloque la batería de nuevo en el Elevador de Pacientes. Asegúrese que la batería esta bien ajustada en el soporte. El Elevador esta listo para usarse.

PROCEDIMIENTO DE EMERGENCIA (Elevador de Pacientes Eléctrico)

Parada de emergencia: La caja de control esta equipada con un botón de parada de emergencia. Este botón puede ser usado cuando el control manual ha dejado de funcionar correctamente. Presione el botón firmemente con la palma de su mano. El botón bloqueará toda actividad deteniendo la función de los motores. Para desbloquear gire el botón en dirección a las manecillas del reloj y regreselo a su posición normal.

DESCENSO DE EMERGENCIA

El motor de su Elevador de Pacientes esta equipado con desbloqueo de emergencia, colocado en la parte superior del motor.

Para bloquear jale para liberar cuando este desbloqueado el engranaje en el cilindro descienda al paciente. El desbloqueo de emergencia es ajustable girando el tornillo adyacente junto a la palanca de tirar. Gire el tornillo en torno a las manecillas del reloj para incrementar y en contra para disminuir la sensibilidad de liberación del mecanismo.

ADVERTENCIA: Cuando utilice la liberación de emergencia, jale hacia atrás lentamente sobre la liberación la cual bajará gradualmente al paciente. Si el paciente desciende muy rápido podría lastimarse. No utilice bajo ninguna circunstancia la liberación de emergencia si el control manual y la batería están operando correctamente. La liberación de emergencia no debe ser utilizada en lugar del control manual o la batería.

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

LEVANTANDO AL PACIENTE DE UNA CAMA

- 1.- Gire al Usuario hacia un lado. Coloque el arnés bajo su espalda, el centro del arnés debe estar paralelo a su espina dorsal. Gire al Usuario sobre su espalda en la parte superior del arnés.
- 2.- Coloque el lazo delante de las piernas y debajo de los muslos.
- 3.- Cruce los lazos uno con otro.
- 4.- Envuelva al Usuario en el Arnés y coloque cada uno de sus orificios en los 4 ganchos de su Elevador de Pacientes, en la mayoría de los casos, los orificios del Arnés están clasificados por colores, asegúrese de que los 4 orificios sean del mismo color al momento de ajustarlos a su Elevador.

PRECAUCIÓN: Las ruedas no deben tener el seguro colocado

- 5.- Cuando los 4 lazos del Arnés estén enganchados, eleve al Usuario cuidadosamente. Si el Usuario se encuentra en una Cama Tipo Hospital sería de ayuda elevar la parte superior de la Cama. Para posicionar al Usuario debe asegurarse de que necesitará un asiento seguro y confortable que este al alcance cuando el Usuario este elevado.
- 6.- Eleve al paciente hasta que sus glúteos queden por encima del colchón. Eleve las piernas del paciente y gírelo de cara a la columna del Elevador. Si es posible descienda la cama antes de elevar al Usuario, una vez que este perfectamente sujeto y enganchado a su Elevador. Mueva al paciente lejos de la cama. Asegúrese que los brazos y piernas del ocupante estén libres del Elevador de Pacientes, cama u otros obstáculos.

PRECAUCIÓN: No intente transferir a ningún paciente sin la aprobación de su médico o sin haber leído las instrucciones de su Elevador de Pacientes.

Use especial cuidado con los pacientes que no pueden cooperar durante la elevación. Verifique que todos los tornillos, ganchos y lazos están fijados seguramente.

Los ayudantes deben practicar la mecánica de elevar y transferir a un Usuario común antes de operar su Elevador.

PRECAUCIÓN: Por ningún motivo debe utilizar un Arnés roto, cortado, rasgado o quebrado ya que podría provocar una lesión.

PRECAUCIÓN: Asegúrese que el piso este despejado y que no haya ningún obstáculo que pueda parar las ruedas y causar que el Usuario se incline en el Elevador.

DESCENDIENDO AL USUARIO A LA CAMA

1.- Levante al Usuario en el Elevador hasta que sus glúteos estén encima de la superficie de la Cama. Mueva el elevador de pacientes con las patas por debajo de la Cama. Tenga cuidado de que el paciente no golpee ninguna proporción de la cama y que sus piernas no están tocando la cama. Si es necesario descienda la altura de su Cama al nivel más bajo.

2.- Centre al Usuario por encima de la Cama y girelo de frente al pie de la cama. Cuidadosamente desciéndalo sobre la Cama. Si es necesario sostenga la cabeza del paciente mientras esta descendiendo. Remueva el arnés revirtiendo el procedimiento de cuando se eleva al paciente.

ELEVANDO AL USUARIO DESDE EL SUELO

1.- Posicione el Elevador de Pacientes detrás del Usuario, coloque una almohada sobre la base para proteger y dar soporte a la cabeza y cuello. Coloque la cabeza cuidadosamente en la base. El Elevador debe estar posicionado con la suspensión centrada sobre el Usuario.

2.- Descienda la suspensión y sujete el arnés a los 4 ganchos.

3.- Levante al Usuario por encima del piso y posicione en el Arnés. Gire al Usuario de cara a la columna de elevación y coloque los pies del Usuario en la base a ambos lados de la columna para mayor estabilidad.

DESCENDIENDO AL USUARIO EN EL PISO

1.- Coloque una almohada en la base para proteger la cabeza y cuello del Usuario (esto es innecesario usando un Arnés con soporte para la cabeza).

2.- Invierta los procesos anteriores para descender al Usuario.

TRANSFIRIENDO AL PACIENTE DE UNA SILLA A UNA SILLA DE RUEDAS

NOTA: Recomendamos que 2 asistentes ayuden durante este procedimiento.

PRECAUCIÓN: Los seguros de las ruedas deben estar colocados antes de descender al Usuario a una Silla de Ruedas. Cualquier falla puede resultar en un movimiento inesperado o accidente tanto para el Usuario como para sus asistentes.

1.- Coloque el Arnés cruzado detrás de la espalda del Usuario en su Silla y empuje hacia abajo hasta que toque el asiento.

2.- Con los lazos jale la sección de las piernas delante y por debajo de los muslos del Usuario. Ahora los lazos se encuentran cruzados uno delante del otro.

3.- Mueva el Elevador de Pacientes delante de la Silla. Enganche los 4 lazos al soporte de su Elevador y eleve al Usuario con precaución.

4.- Retire la Silla en donde estaba sentado el Usuario y acerque su Silla de Ruedas a la posición del Elevador.

5.- Coloque los seguros de las ruedas de la Silla de Ruedas para prevenir cualquier movimiento.

6.- Posicione al Usuario sobre la Silla de Ruedas con su espalda hacia el respaldo de la Silla.

7.- Despacio descienda al Usuario sobre la Silla de Ruedas, hasta que se encuentre perfectamente sentado.

8.- Con un asistente detrás de la Silla de Ruedas y otro operando el Elevador, tire de la palanca o a los lados del arnés para colocar al paciente en el respaldo de la Silla. Esto mantendrá un buen centro de balance y evitará que la Silla de caiga o se tambalee.

9.- Para retirar el Arnés, tire de la sección de las piernas hacia un lado por debajo de los muslos del Usuario. De pie a un lado incline al Usuario hacia adelante apoyándolo con una mano. Jale el arnés detrás de la espalda y regreselo a su posición de sentado.

PRECAUCIÓN: Tirar muy fuerte del Arnés puede provocar que el Usuario se caiga y podría herirse. Siempre mantenga un brazo del Usuario alrededor de los hombros del asistente cuando coloque o remueva el Arnés, esto le dará mayor seguridad y soporte.

NOTA: Si es posible el Usuario debe animarse a formar parte del proceso de transferencia, auxiliando en lo posible a ponerse y quitar el Arnés, inclinarse, elevarse y ayudar a remover la sección de las piernas.

CUIDADOS Y MANTENIMIENTO

Los cuidados y mantenimientos apropiados son esenciales para mantener su Elevador de Pacientes en una condición de operación segura. Además de inspeccionar la unidad antes de cada uso, también debe hacerse un mantenimiento por lo menos una vez al año por un Distribuidor Autorizado.

PRECAUCIÓN: Es muy importante que el Elevador de Pacientes sea revisado siempre antes de usarse. Asegúrese de que el equipo y los accesorios están completos y perfectamente instalados. Alguna falla o mal funcionamiento podría resultar en un accidente tanto para el Usuario como para la persona que lo atiende o igualmente una avería grave en su Elevador de Pacientes. Las partes mal colocadas, rotas, fragmentadas o cortadas pueden no tener un funcionamiento óptimo y podrían causar un accidente. Solo utilice Arnesees en buen estado. Inspeccione antes de cada uso. Destruye o descarte viejos Arnesees y Ganchos para evitar accidentes.

Cuando usted crea que una parte o componente no esta funcionando correctamente, contacte inmediatamente a su Distribuidor Autorizado para su revisión.

ANTES DE CADA USO:

Antes de cada uso asegúrese de que el Elevador de Pacientes:

- 1) Tiene todos los tornillos y tuercas bien ajustados.
- 2) Que se mueve libremente (sin poner los seguros).
- 3) Que los frenos traseros funcionan correctamente.
- 4) Que el mecanismo de la base funciona correctamente.
- 5) Que la bomba hidráulica funcione correctamente (solamente Elevador Hidráulico)
Que el sistema eléctrico funcione de forma correcta (solamente Elevador Eléctrico)

BATERIA

Para incrementar el tiempo de vida de su batería, mantenga la batería cargada aun cuando no este en uso.

LUBRICACIÓN

Su Elevador de Pacientes esta diseñado para tener un mantenimiento mínimo; sin embargo se recomienda que cada 6 meses se haga un chequeo y se lubriquen las partes movibles para que su Elevador de Pacientes se encuentre en excelentes condiciones y funcione correctamente. Las ruedas deben moverse y rodar libremente.

Usted puede aplicar grasa a las tuercas entre las ruedas mínimo cada 6 meses. Aplique grasa mas frecuentemente a las partes que se encuentren en mayor uso. Limpie el Elevador de Pacientes del exceso de aceite y grasa periodicamente con un trapo húmedo.

Igualmente usted puede poner una gota de aceite en aquellas partes que por su uso se han vuelto duras o de difícil manejo:

Mástil

Ganchos giratorios de la barra

El asa de la bisagra

Ejes orientales

LIMPIEZA

Es recomendada la limpieza regular de su Elevador de Pacientes con un paño suave húmedo. La grasa para encerar puede ayudar a mantener limpio su Producto por un mayor periodo de tiempo. No lo lave con agua a presión o limpiadores de vapor.

CAPACIDAD DE PESO

180 Kg.

CALENDARIO DE MANTENIMIENTO

Item	Inspecciones iniciales	Inspeccionar Ajuste diario	Inspeccionar Ajuste mensual	Inspeccionar Ajuste cada 6 meses
Base y Ruedas				
Asegurese de que las 4 Ruedas tocan el piso	*		*	*
Asegurese que los pernos y ejes esten apretados	*		*	
Asegurese de que las ruedas giran y se mueven libremente	*		*	
Aplique grasa ligera a los rodamientos de las ruedas				*
Ajuste de la base				
Asegurese que la base abre y cierra suavemente	*		*	*
Asegurese que la base cierra en las 3 posiciones	*		*	
Asegurese que el mando esta en su lugar y funcionando	*		*	
Inspeccione la base por desgaste			*	
Mastil				
Asegurese que el mastil este bien colocado, enganchado y cerrado	*		*	
Inspeccione si el mastil presenta curvas y desvios			*	
Inspeccione el soporte del mastil por desgaste			*	*
Auge				
Inspeccione el auge por curvas o desvios	*		*	
Asegurese de que el auge este bien colocado	*		*	*
Inspeccione el soporte del auge por desgaste			*	
Percha				
Inspeccione la percha por degastes o daños			*	
Inspeccione el eslingue del gancho por daño o desgaste			*	*
Inspeccione la barra de la percha por desgaste o daño			*	*
Arnés				
Inspeccione el arnés por daño o desgaste		*		
Inspeccione el metal/plastico del arnés por desgaste o daño		*		
Lubricar con aceite ligero				
Lubricar todos los puntos de pivote				*
Lubricar arriba y abajo del montaje del actuador				*
Limpieza				
Limpie con un detergente no abrasivo				*
Bomba (Elevador de pacientes hidraulico)				
Asegurese de que la bomba se encuentra bien colocada	*		*	
Inspeccione la bomba por desgaste o daño			*	
Electronica y Actuador (Elevador de Pacientes Eléctrico)				
Asegurese que la batería esta completamente cargada	*	*		
Inspeccione que la función de bajar y subir opere correctamente	*	*		
Asegurese que este correctamente montado	*		*	
Inspeccione por daños o desgaste			*	

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

ADVERTENCIA: Si Usted esta experimentando problemas con su Elevador de Pacientes contacte a un Distribuidor Autorizado para su revisión.

ELEVADOR DE PACIENTES HIDRÁULICO

SINTOMA	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN
El Elevador no sube ni baja	Aire en el cilindro. Perdida de fluido hidráulico.	Purgar el cilindro girando la perilla de liberación y empujar hacia abajo el mástil. Suba el elevador de nuevo y gire la perilla de liberación del mástil. Reemplace cualquier cilindro con fuga.
El Elevador no baja	Aire en el cilindro	Mire las instrucciones anteriores

NOTA: Si el cilindro hidráulico comienza a tener fugas, no opere el Elevador, contacte a su Distribuidor Autorizado por un nuevo cilindro.

ELEVADOR DE PACIENTES ELÉCTRICO

SINTOMA	POSIBLE CAUSA	ACCIÓN
La caja de control no responde	Batería descargada Cargador de batería defectuoso Batería defectuosa Control manual defectuoso	Cargar la batería Reemplace el cargador Reemplace la batería Reemplace el control manual
El transmisor no funciona	El transmisor no esta conectado correctamente Transmisor defectuoso El control del arco esta defectuoso	Presione el transmisor firmemente en el control del arco Reemplace el transmisor Reemplace la caja de control
El transmisor baja o sube pero no ambos	El control manual esta defectuoso	Reemplace el control manual

GARANTÍA LIMITADA

Su Elevador de Pacientes Hidráulico/Eléctrico **ReActiv** esta garantizado contra defectos de fabricación y materiales defectuosos por **UN AÑO** a partir de la fecha de compra original.

La Garantía Limitada de **ReActiv** es válida en los siguientes casos:

Cuando se demuestre que el Producto en cuestión está dentro de su plazo de Garantía

Cuando el Artículo no haya sido modificado y/o alterado de cualquier forma, por personas no autorizadas por **ReActiv**.

Cuando los desperfectos o daños en el artículo adquirido no hayan sido ocasionados como consecuencia del abuso, negligencia y/o mal uso del producto por parte del Usuario o por haber sido sometido a esfuerzos y desgastes extraordinarios para los que no fueron diseñados.

Cuando los desperfectos o daños en el artículo adquirido no hayan sido ocasionados por el desgaste normal del producto.

Cuando el artículo no haya sido expuesto a elementos nocivos como ácidos, químicos, fuego o cualquier otro similar o equivalente ya sea de manera accidental o intencional.

Cuando la falla o deterioro no sea ocasionado por riesgos de transporte, incluyendo fleteras y/o maniobras ajenas a **ReActiv**.

En caso de requerir mayor información acerca de nuestras Políticas de Garantía consulte a su Distribuidor Autorizado o visite nuestro sitio web www.reactiv.com.mx en donde encontrará mayores informes.



Más servicios y Productos en:
www.reactiv.com.mx