



# Certificado de Garantía

En caso de tener alguna duda con respecto al uso de su Silla de Ruedas contacte a un **Distribuidor Autorizado ReActiv** antes de utilizar su equipo.

Es recomendable que los frenos estén accionados antes de que el Usuario se siente en su Silla, para evitar posibles accidentes.

Los descansapiés deben encontrarse en posición vertical cuando la Silla esté desocupada, así como cuando el Usuario vaya a incorporarse o salir de su Silla.

Por seguridad del Usuario no se recomienda que intente recoger objetos del piso mientras permanece en su Silla de Ruedas.

Se sugiere la instalación de un cinturón de seguridad como protección del Usuario de Silla de Ruedas. (No incluido)

Extreme precauciones al transitar por caminos irregulares o terracería, cuando libere obstáculos o escalones. Su Silla no debe inclinarse más allá de su punto de balance, ya que el acompañante tendrá que soportar el peso de la silla y su ocupante pudiendo ocasionar un accidente.

Es preferible que el acompañante tenga suficiente fuerza para controlar y operar la Silla.

Nunca use el freno para reducir o controlar la velocidad de la Silla pues esto pone en peligro al Usuario.

Siempre deberá utilizar su Silla de Ruedas con los descansapiés en la posición correcta y con ambos pies del ocupante firmemente colocados sobre ellos.

El peso máximo que soporta su Silla de Ruedas es de 100 kg. Por ninguna razón exceda este límite.

Los pedales de los descansapiés están diseñados para soportar solamente el peso de los pies mientras el Usuario se encuentra sentado. **NUNCA SE PARE SOBRE LOS DESCANSAPIÉS.**

**NUNCA USE SU SILLA DE RUEDAS COMO UN ASIENTO DENTRO DE NINGÚN VEHÍCULO.**

## DATOS TÉCNICOS

<b>ALTURA</b> Total-Al Brazo-Al Asiento	<b>ANCHO</b> Total	<b>ASIENTO</b> Ancho-Profundidad
 88-74-47 cm	 62 cm	 18" 16"
<b>RUEDAS</b> Trasera-Delantera	<b>SOPORTA</b>	<b>PESO</b>
 23" 8"	 100 kg	 15 kg

**IMPORTADO POR:**  
ReActiv S.A. de C.V., Av. Ángel Leaño 401 Int 3C,  
Colonia los Robles, C.P. 45134 Zapopan, Jalisco, México  
Tel. 33 3636 1212  
RFC: REA970623V45

Su Silla de Ruedas **ReActiv** está garantizada por 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta Garantía\* cubre cualquier defecto de Fabricación y Funcionamiento, así como imperfecciones de Materiales y Mano de Obra.

La Fecha de Adquisición deberá ser demostrada mediante la Factura Original que corresponde a la Silla de Ruedas, expedida por **ReActiv S.A. de C.V.** o un Distribuidor Autorizado, en la cual se indique claramente el Modelo y Número de Serie de la misma.

### Esta Garantía no es válida en los siguientes casos:

Quando los desperfectos o daños en su Silla de Ruedas hayan sido ocasionados como consecuencia del Mal uso o Mantenimiento inadecuado del Producto, o por haber sido sometida a esfuerzos o desgastes extraordinarios para los que no fue diseñada.

Quando no se demuestre que la Silla de Ruedas está dentro del Plazo de la Garantía.

Quando la Silla de Ruedas haya recibido golpes accidentales, intencionales o haya sido expuesta a elementos nocivos como agua, ácidos, fuego o cualquier otro similar o análogo.

Quando la Silla de Ruedas haya sido alterada de cualquier forma.

La Garantía de su Silla de Ruedas **NO CUBRE** defectos ocasionados por Mal Uso, Abuso, Negligencia u Operación Inapropiada fuera de las Especificaciones del Producto.

\*Aplican Restricciones. Favor de consultar Nuestra Tabla de Garantía Limitada en nuestro sitio web:  
[www.reactiv.com.mx](http://www.reactiv.com.mx)



## Manual de uso y Mantenimiento

Silla de Ruedas



[www.reactiv.com.mx](http://www.reactiv.com.mx)

R211001F-A, R211001F-G, R211001F-NG, R211001F-R





- |                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1.- Puños manerales          | 6.- Reflectantes              |
| 2.- Respaldo plegable        | 7.- Descansapiés desmontables |
| 3.- Perilla para plegado     | 8.- Rueda delantera 8"        |
| 4.- Descansabrazos acojinado | 9.- Pantorrillera             |
| 5.- Rueda trasera 23"        | 10.- Pedal Descasapiés        |

Es muy importante que antes de utilizar su Silla de Ruedas Activ2F By ReActiv lea este manual, esto le permitirá darle el uso y cuidado correcto a su Silla para que funcione en forma adecuada.

Su Silla de Ruedas Activ2F By ReActiv está diseñada para un Usuario con peso máximo de 100 kg. tome a consideración este dato para la validación de su Garantía.

La calidad y mano de obra de las Sillas de Ruedas Activ son comprobadas antes de salir de fábrica. Sin embargo es importante que verifique que todas las partes estén incluidas en la caja y que estas no estén dañadas. Verifique que todos los tornillos y uniones estén apretados y colocados correctamente.

**Esta caja contiene:**

- Silla de Ruedas Activ2F By ReActiv
- Descansapiés Derecho
- Descansapiés Izquierdo
- Pantorrillera
- Llave de tuercas

Una vez que ha comprobado que su Silla está en perfecto estado y se incluyen sus piezas, remueva todo el plástico que la protege y deséchelo.

Nunca abra su Silla de Ruedas jalando los descansabrazos ya que puede dañar el chasis (Figura 1).

Despliegue la Silla haciendo presión hacia abajo en los extremos del asiento hasta que esté completamente extendida y horizontal (Figura 2).



Figura 1



Figura 2

Cerciórese de que las cuatro ruedas estén firmemente sobre una superficie plana.

Inserte los descansapiés izquierdo y derecho en los orificios laterales (Figura 3), una vez colocados correctamente, inserte el seguro en el orificio de la parte de arriba del descansapiés hasta que escuche un clic (Figura 4).



Figura 3



Figura 4

Abata los pedales del descansapiés hasta que queden en posición horizontal para que pueda descansar el pie. Usted puede ajustar la altura de los descansapiés mediante el tornillo que se encuentra en la parte inferior del soporte, aflojando y apretando hasta dejarlo en la posición deseada.

Es importante dejar espacio suficiente entre el descansapiés y el suelo para evitar obstáculos en el camino.

Ajuste la pantorrillera colocando la banda alrededor del tubular del descansapiés y fíjela en el otro extremo (Figura 5).



Figura 5

Esta pantorrillera evita que las piernas del Usuario resbalen hacia la parte interior de la Silla mientras se utiliza. Nunca haga uso de la Silla sin este accesorio instalado.

Una vez realizadas estas tareas de instalación, usted puede comenzar a usar su Silla de Ruedas.

Para plegar el respaldo gire las perillas que se encuentran en la parte posterior del respaldo (Figura 6), una vez que se han girado baje el respaldo (Figura 7) para que su Silla quede más compacta al momento de guardarla o introducirla al automóvil.

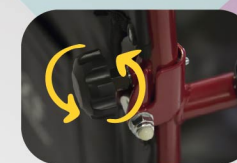


Figura 6



Figura 7

**MODO DE USO**

El Usuario de la Silla de Ruedas puede utilizar el aro motriz de su Silla para maniobrarla hacia adelante y atrás y virar en la dirección deseada. Es importante que el aro motriz únicamente se utilice para mover la Silla, usarlo para otro fin puede ocasionar lesiones al Usuario.

Adicionalmente, los manerales en el respaldo de la Silla pueden ser usados para empujarla, en caso de que el Usuario no pueda maniobrar por sí mismo. El respaldo de su Silla de Ruedas Activ2F By ReActiv, cuenta con una bolsa porta objetos que le ayudará a llevar pertenencias menores.

Su Silla de Ruedas también cuenta con un pedal trasero que permite al acompañante levantarla evitando obstáculos y facilitando la maniobra en escalones.

Si requiere que su Silla permanezca estática, aplique los frenos para evitar que las ruedas se muevan. Para accionar el freno empuje la palanca en dirección frontal hasta que se tope contra la rueda, repita la operación en ambas ruedas.

Para volver a andar, libere los frenos en ambas ruedas antes de mover la Silla en cualquier dirección.

Para Inclinarsse y alcanzar un objeto mueva la Silla de Ruedas tan cerca como sea posible del artículo que intenta alcanzar. Aplique ambos frenos de las ruedas traseras. Únicamente intente tomar objetos que estén al alcance de sus brazos cuando se encuentre sentado firmemente sobre la Silla. No recargue su peso hacia el artículo que pretende tomar pues esto puede cambiar el centro de gravedad de la Silla, causando una volcadura.

**CUIDADO DE LA SILLA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD**

Las siguientes recomendaciones se hacen para el uso seguro de la Silla:

Limpie regularmente su Silla de Ruedas con un paño húmedo con detergente suave, al terminar el aseo, la Silla debe quedar completamente seca para evitar la corrosión.

Antes de usar la Silla asegúrese de que no hay evidencia de daños, desgaste en las ruedas, asiento o respaldo y que sus uniones y tornillos estén perfectamente ajustados.

Puede plegar su Silla cuando no esté en uso para facilitar su resguardo. Solo tome los extremos del asiento y levántelos hasta que quede completamente plegada.

El Usuario tanto como el acompañante deben leer el manual de uso y conocer el manejo seguro antes de utilizarla.