

CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

- Limpie y seque su Banco Ducha después de cada uso. De ser necesario, quite la suciedad con un paño húmedo y jabón neutro. Posteriormente seque.
- No use limpiadores químicos agresivos o abrasivos ya que pueden dañar el material del asiento, respaldo y brazos.
- En caso de contaminación con material infectado, utilice los medios habituales de desinfección.
- Siga estas sencillas recomendaciones para que su Producto tenga varios años de vida útil.

En caso de que exista alguna duda sobre el uso o ensamble de su Banco Ducha póngase en contacto con su Distribuidor Autorizado REActiv, quien lo orientará y le brindará la información necesaria para el correcto uso de su Producto.



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Sueños en Movimiento®

www.reactiv.com.mx



BANCO PARA DUCHA CON Respaldo



Manual de Uso
y Ensamble

www.reactiv.com.mx

BANCO PARA DUCHA con Respaldo

Manual de Uso y Ensamble

Lea cuidadosamente estas instrucciones antes de utilizar su Banco Ducha con Respaldo. Si tiene alguna duda sobre el uso de su Producto, consulte a su Distribuidor Autorizado **ReActiv** quien seguramente le ayudará al respecto. El ensamble y uso de su Banco Ducha es rápido y sencillo.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES PARA SU FUTURA REFERENCIA

INFORMACIÓN GENERAL

- El Banco para Ducha esta diseñado para utilizarse dentro del área de baño. Sólo se debe usar sobre duchas, bañeras o suelos estables y no deslizantes.
- Este Producto está diseñado para cuidados en casa como en Clínicas u Hospitales.
- No utilice su Producto para ningún otro uso distinto al previsto. No utilice este Producto como escalera, ni se ponga de pie en él. Evite que los niños jueguen con su Banco Ducha ya que pueden ocasionar accidentes.
- No modifique el Producto de su configuración original ni le añada otros elementos, ya que esto afectará su funcionamiento y hará nula la validez de su Garantía.
- Antes de su uso, verifique que todos los componentes de su Producto estén completos y en perfecto estado, ponga especial atención en los tubos de altura ajustable, verificando que los pernos estén bien asegurados. En caso de que algún componente no estuviera en perfectas condiciones de uso, debe reemplazarlo por un repuesto original.
- No utilice su Banco Ducha en caso de irritaciones, presión, dolor o incomodidad evidentes.

MEDIDAS Y ESPECIFICACIONES



ALTURA AJUSTABLE: 40 a 50 cms.



MEDIDAS ASIENTO:
40.5 X 33.5 cms.



PROFUNDIDAD: 50 cms.



PESO QUE SOPORTA:
100 Kg.




ANCHO: 53 cms.

PESO DEL PRODUCTO:
3 Kg.



ENSAMBLE E INSTALACIÓN

Verifique que su Banco para Ducha cuente con todos sus componentes completos y en perfecto estado.

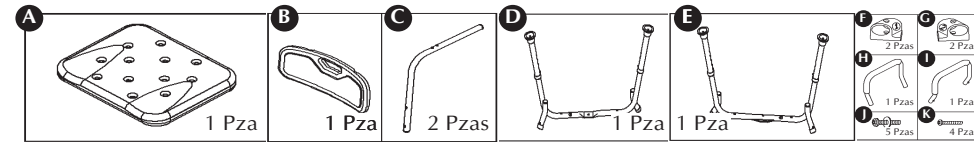

Siga estos sencillos pasos para ensamblar su producto:

