

## CARÁCTERÍSTICAS



## INFORMACIÓN TÉCNICA



## CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y USO

- Temperatura: -10 C° a 50 C°
- Presión Atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa
- Humedad Relativa: 20% a 70%

## Distribuidor Autorizado ReActiv



## MANUAL DE USO E INSTALACIÓN

Gracias por elegir la Cama Hospitalaria Manual Serie 920 de dos Manivelas ReActiv.

Antes de hacer uso de esta Cama lea cuidadosamente este manual. Si tiene dudas acerca del uso de este producto por favor contacte a su distribuidor autorizado.

## INTRODUCCIÓN

Es importante que verifique que todas las partes estén incluidas en la caja y que no estén dañadas.

Una vez que ha comprobado que su Cama está en perfecto estado y se incluyen sus piezas, remueva todo el plástico que la protege y deséchelo.


La Cama Hospitalaria Manual Serie 920 de dos Manivelas ReActiv cuenta con las siguientes características:

- Estructura de acero cubierta de pintura epóxica resistente a la corrosión.
- Sección de espalda ajustable a ángulos de 0° -70°±5°
- Sección de piernas ajustable a ángulos de 0°-35°±5°
- Límite de peso 250 kg


## INSTALACIÓN

- Instale la cabecera y la piecera en los soportes correspondientes de la base de la cama como se muestra en la figura (FIG 1).

- Inserte las ruedas en los orificios ubicados en las patas de la cabecera y piecera (FIG 2).

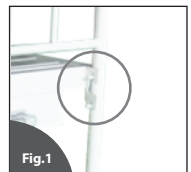

- Coloque la barra rotatoria de ajuste de altura entre los soportes ubicados bajo los paneles de acero de la cama.
- En el lado que conecta a las manivelas asegure la barra rotatoria al soporte insertando un tornillo hexagonal como se muestra en la figura (**FIG 3**), repita en el otro extremo.
- Inserte el final de la barra rotatoria a las manivelas.

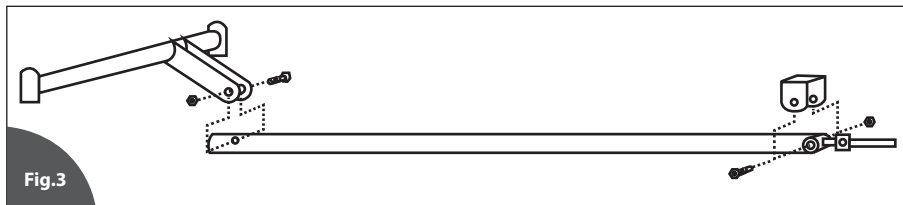

## INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

- Las secciones de respaldo y piernas se ajustan rotando las manivelas ubicadas al final de la cama.
- La manivela derecha controla el ajuste del respaldo y la izquierda controla la sección de las piernas.
- Para levantar cualquiera de las dos secciones gire la manivela correspondiente en sentido de las manecillas del reloj, y en sentido opuesto para bajarlas a su posición horizontal.

## PARA DESARMAR SU CAMA

- Para desarmar su cama debe seguir la siguiente secuencia:
  - Ajuste las secciones de la cama en posición horizontal.
  - Remueva la cabecera y piecera.
- Finalmente remueva la barra rotatoria retirando los tornillos correspondientes.

## LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

- Limpie su Cama cada mes, usando un paño húmedo y desinféctela con alcohol.
- Lubrique con aceite las piezas móviles para facilitar su funcionamiento.
- Cuando la cama no este en uso los paneles de piernas y respaldo deben permanecer en una posición horizontal.
- Cuando sea necesario trasladar la cama evite obstáculos más altos de 10 cm.
- Esta cama no esta diseñada para el uso en pacientes con enfermedades mentales crónicas.
- Utilice únicamente refacciones y accesorios originales.

## MANTENIMIENTO PREVENTIVO

La cabecera, piecera, paneles y mecanismo deben ser inspeccionados por un profesional de forma preventiva para asegurar el buen funcionamiento de la cama y evitar accidentes potenciales para el paciente. La cama debe ser desinfectada con alcohol regularmente.

Siga las siguientes recomendaciones periódicamente para mantener su Cama Hospitalaria en buenas condiciones:

- Lubrique las piezas móviles.
- Verifique que los componentes de la cama no estén dañados o deformes.
- Asegúrese que los mecanismos de la cama funcionen sin problemas.
- Verifique que las manivelas giren sin dificultad.
- No debe existir problemas al subir y bajar los barandales.
- Las ruedas deben moverse sin dificultad.
- Revise que la superficie de la cama no tenga desgaste o este dañada.
- No exceda el límite de peso permitido para su Cama Hospitalaria (250 kg).

## GARANTÍA LIMITADA

Su Cama Hospitalaria ReActiv está garantizada por 2 años a partir de la fecha de compra original. Esta Garantía\* cubre cualquier defecto de Fabricación y Funcionamiento, así como imperfecciones de Materiales y Mano de Obra.

La Fecha de Adquisición deberá ser demostrada mediante la Factura Original que corresponde a la Cama Hospitalaria, expedida por ReActiv S. A. de C. V. o un Distribuidor Autorizado, en la cual se indique claramente el Modelo y Número de Serie de la misma.

Esta Garantía no es válida en los siguientes casos:

- Cuando los desperfectos o daños en su Cama Hospitalaria hayan sido ocasionados como consecuencia del Uso o Mantenimiento inadecuado del Producto, o por haber sido sometida a esfuerzos o desgastes extraordinarios.
- Cuando no se demuestre que la Cama Hospitalaria está dentro del Plazo de la Garantía.
- Cuando la Cama haya recibido golpes accidentales o intencionales o haya sido expuesta a elementos nocivos como agua, ácidos, fuego o cualquier otro similar o análogo.
- Cuando la Cama haya sido alterada de cualquier forma.
- Cuando la Cama haya sido utilizada excediendo el límite de peso permitido (250 kg).
- La Garantía de su Cama Hospitalaria NO CUBRE defectos ocasionados por Mal Uso, Abuso, Negligencia u Operación Inapropiada fuera de las Especificaciones del Producto.

\*Aplican Restricciones, favor de consultar Nuestra Tabla de Garantía Limitada en nuestro sitio web: [www.reactiv.com.mx](http://www.reactiv.com.mx)