

tendrá que soportar el peso de la silla y su ocupante pudiendo ocasionar un accidente.

- Es preferible que el acompañante tenga suficiente fuerza para controlar y operar la Silla.
- Nunca use el freno para reducir o controlar la velocidad de la Silla pues esto pone en peligro al Usuario.
- Siempre deberá utilizar su Silla de Ruedas con los descansapiés en la posición correcta y con ambos pies del ocupante firmemente colocados sobre ellos.
- El peso máximo que soporta su Silla de Ruedas es de 120 kg. Por ninguna razón exceda este límite.
- Los pedales de los descansapiés están diseñados para soportar solamente el peso de los pies mientras el usuario se encuentra sentado. **NUNCA SE PONGA DE PIE SOBRE LOS DESCANSAPIÉS.**

NUNCA USE SU SILLA DE RUEDAS COMO UN ASIENTO DENTRO DE NINGÚN VEHÍCULO.

CERTIFICADO DE GARANTÍA

Su Silla de Ruedas ReActiv está garantizada por 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta Garantía* cubre cualquier defecto de Fabricación y Funcionamiento, así como imperfecciones de Materiales y Mano de Obra.

La Fecha de Adquisición deberá ser demostrada mediante la Factura Original que corresponde a la Silla de Ruedas, expedida por ReActiv S. A. de C. V. o un Distribuidor Autorizado, en la cual se indique claramente el Modelo y Número de Serie de la misma.

Esta Garantía no es válida en los siguientes casos:

Cuando los desperfectos o daños en su Silla de Ruedas hayan sido ocasionados como consecuencia del Mal uso o Mantenimiento inadecuado del Producto, o por haber sido sometida a esfuerzos o desgastes extraordinarios para los que no fue diseñada.

Cuando no se demuestre que la Silla de Ruedas está dentro del Plazo de la Garantía.

Cuando la Silla de Ruedas haya recibido golpes accidentales, intencionales o haya sido expuesta a elementos nocivos como agua, ácidos, fuego o cualquier otro similar o análogo.

Cuando la Silla de Ruedas haya sido alterada de cualquier forma.

La Garantía de su Silla de Ruedas NO CUBRE defectos ocasionados por Mal Uso, Abuso, Negligencia u Operación Inapropiada fuera de las Especificaciones del Producto.

*Aplican Restricciones. Favor de consultar Nuestra Tabla de Garantía Limitada en nuestro sitio web: www.reactiv.com.mx



SILLA DE RUEDAS

DESCUBRE MÁS MODELOS



SILLA DE RUEDAS ACTIV 2
FIJA, ESMALTADA CON RUEDA MAG



SILLA DE RUEDAS ACTIV 2
CON CÓMODO INTEGRADO



SILLA DE RUEDAS XTREME KIDDY
RIN ALUMINIO
RUEDA TRASERA 20X1.75"



SILLA DE RUEDAS MOVILI RE
RECLINABLE CON ELEVAPIERNAS



SILLA DE RUEDAS MOVILI
SILVER VEIN DESCASABRAZOS
Y ELEVAPIERNAS DESMONTABLES





INFORMACIÓN TÉCNICA



Es muy importante que antes de utilizar su Silla de Ruedas Activ Xtreme lea este manual, esto le permitirá a darle el uso y cuidado correcto a su Silla para que funcione en forma adecuada.

Su Silla de Ruedas Activ Xtreme está diseñada para un Usuario con peso máximo de 120 kg. tome a consideración este dato para la validación de su Garantía.

La calidad y mano de obra de las Sillas de Ruedas Activ son comprobadas antes de salir de fabrica. Sin embargo es importante que verifique que todas las partes estén incluidas en la caja y que estas no estén dañadas. Verifique que todos los tornillos y uniones estén apretados y colocados correctamente.

Esta caja contiene:

- Silla de Ruedas Activ Xtreme
- Descansapiés Derecho
- Descansapiés Izquierdo
- Taloneras
- Llave Allen y llave de tuercas
- Bomba de Inflación y Kit de Parches

Una vez que ha comprobado que su Silla está en perfecto estado y se incluyen sus piezas, remueva todo el plástico que la protege y deséchelo.

Nunca abra su Silla de Ruedas jalando los descansabrazos ya que puede dañar el chasis de sus Silla.



Despliegue la Silla haciendo presión hacia abajo en los extremos del asiento hasta que este completamente extendida y horizontal (FIG 1 y 2).


Cerciórese que las cuatro ruedas estén firmemente sobre una superficie plana.

Inserte los descansapiés izquierdo y derecho en los pernos laterales, una vez insertados correctamente, gírelos hacia el frente hasta que el seguro se active, escuchará un clic (FIG 3 y 4).



Abata los pedales del descansapiés hasta que queden en posición horizontal para que pueda descansar el pie. Usted puede ajustar la altura de los descansapiés mediante el tornillo sin fin que se encuentra en la parte inferior del soporte, aflojando y apretando hasta dejarlo en la posición deseada. Es importante dejar espacio suficiente entre el descansapiés y el suelo para evitar obstáculos camino.

Ajuste las taloneras como se muestra en la figura 5 y 6, coloque la banda alrededor del tubular del pedal del descansapiés y fíjela en el otro extremo, repita la operación en ambos lados.

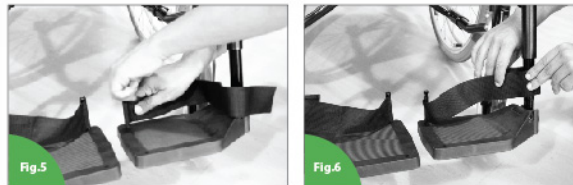

Esta talonera evita que el pie del Usuario resbale del pedal de manera accidental asiento de la Silla de Ruedas de manera accidental mientras se utiliza. Nunca haga uso de la Silla sin este accesorio instalado.

Una vez realizadas estas tareas de instalación, usted puede comenzar a usar su Silla de Ruedas.

MODO DE USO

El Usuario de la Silla de Ruedas puede utilizar el aro motriz de su Silla para maniobrarla hacia adelante y atrás y virar en la dirección deseada. Es importante que el aro motriz únicamente se utilice para maniobrar la Silla, usarlo para otro fin puede ocasionar lesiones al Usuario.

Adicionalmente los manerales en el respaldo de la Silla pueden ser usados para empujarla, en caso de que el Usuario no pueda maniobrar por sí mismo. El respaldo de su Silla de Ruedas Activ Xtreme, cuenta con una bolsa porta objetos que le ayudará a llevar pertenencias menores.

Su Silla de Ruedas también cuenta con un pedal trasero que permite al ayudante levantarla evitando obstáculos y facilitando la maniobra en escalones.


Si requiere que su Silla permanezca estática, aplique los frenos para evitar que las ruedas se muevan. Para accionar el freno empuje la palanca en dirección frontal hasta que se tope contra la rueda, repita la operación en ambas ruedas.

Para volver a andar, libere los frenos en ambas ruedas antes de mover la Silla en cualquier dirección.

Para Inclinar y alcanzar un objeto mueva la Silla de Ruedas tan cerca como sea posible al objeto que intenta alcanzar. Aplique ambos frenos de las ruedas traseras. Únicamente intente tomar objetos que estén al alcance de sus brazos cuando se encuentre sentado firmemente sobre la Silla. No recargue su peso hacia el objeto que pretende tomar pues esto puede cambiar el centro de gravedad de la Silla, causando una volcadura.

¿Cómo usar el Sistema Quick Release?


Simplemente presione el botón ubicado en el centro de los rayos y realice la extracción jalando la rueda (FIG 7).

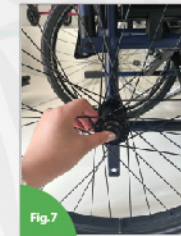

CUIDADO DE LA SILLA Y MEDIDAS DE SEGURIDAD

Las siguientes recomendaciones se hacen para el uso seguro de la Silla:

- Limpie regularmente su Silla de Ruedas con un paño húmedo con detergente suave, al terminar el aseo, la Silla debe quedar completamente seca para evitar la corrosión.
- Antes de usar la Silla asegúrese que no hay evidencia de daños, desgaste en las ruedas, asiento o respaldo y que sus uniones y tornillos estén perfectamente ajustados.
- Puede plegar su Silla cuando no esté en uso para facilitar su resguardo. Sólo tome los extremos del asiento y levántelos hasta que quede completamente plegada (FIG 8 y 9).

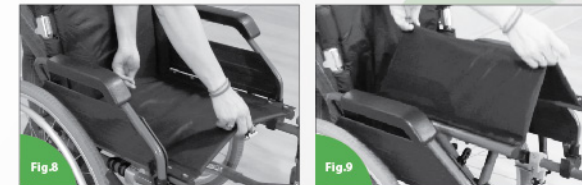

- El usuario tanto como el acompañante deben leer el manual de uso y conocer el manejo seguro antes de utilizarla.
- En caso de tener alguna duda con respecto al uso de su Silla de Ruedas contacte a un Distribuidor Autorizado ReActiv antes de utilizar su equipo.
- Es recomendable que los frenos estén accionados antes de que el Usuario se siente en su Silla, para evitar posibles accidentes.
- Los descansapiés deben encontrarse en posición vertical cuando la Silla este desocupada, así como cuando el usuario vaya a incorporarse o salir de su Silla.
- Por seguridad del Usuario no se recomienda que intente recoger objetos del piso mientras permanece en su Silla de Ruedas.
- Se sugiere la instalación de un cinturón de seguridad como protección del Usuario de Silla de Ruedas. (No incluido)
- Extreme precauciones cuando transite por caminos irregulares o terracería, cuando libere obstáculos o escalones. Su Silla no debe inclinarse más allá de su punto de balance, ya que el acompañante