




Andadera Rollator Plegoö Travel


de Aluminio, Plegable, con Descansapiés,
Sistema de Frenos y Ruedas de 8"
R219 051

Antes de hacer uso de su Andadera Rollator Plegoö Travel lea cuidadosamente este manual. Si tiene dudas acerca de su uso contacte a su Distribuidor Autorizado ReActiv quien podrá ampliar la información.

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

- Una vez que ha comprobado que su Andadera está en perfecto estado remueva todo el plástico que la protege y deséchelo.
- Verifique que las ruedas giren sin obstrucciones.
- Despliegue la Rollator empujando hacia abajo el asiento hasta que las cuatro patas se encuentren completamente extendidas, se escuchará un "clic" cuando quede fija.
- Inserte las ruedas traseras en la Rollator con los botones a presión (**Fig 1 y 2**).
- Inserte las ruedas frontales haciendo coincidir los orificios del marco de la Rollator y de la extensión de las ruedas y fíjelas con las perillas proporcionadas (**Fig 3, 4 y 5**).
- Instale la bolsa porta objetos en la barra localizada bajo el asiento y asegure con el velcro sus lados.
- Inserte los descansapiés en los soportes de cada lado de la Rollator y deslícelos hacia el frente hasta que queden fijos.
- Los manubrios de la Rollator son ajustables, deslícelos presionando el botón hasta alcanzar la altura adecuada.
- Ajuste la altura de la Rollator de forma que cuando su brazo se encuentre relajado, la agarradera de la Andadera esté a la altura de su muñeca.
- Al usar su Rollator, su codo no debe flexionarse mas de 20° a 30°.

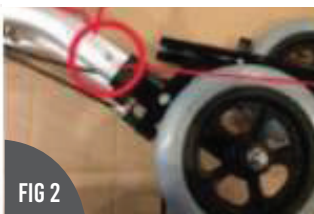

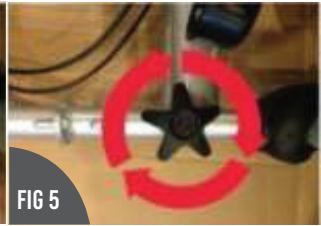

RECOMENDACIONES DE USO

- Antes de utilizar su Andadera verifique que los frenos estén funcionando correctamente.
- Coloque su Rollator en una superficie plana.
- Para andar alinee la mitad de su pie con las ruedas traseras de la Rollator, deslice su Andadera frente a Usted, descanse las ruedas de la misma en una superficie plana y avance hacia el frente.
- Cuidadosamente camine hacia adelante un paso a la vez.
- Para avanzar más lento jale suavemente ambos frenos hacia arriba.
- Para utilizar su Andadera Rollator como asiento empuje ambos frenos hacia abajo, escuchará un "clic" que le indicará cuando estén fijos, para liberarlos jale los frenos hacia arriba nuevamente.
- Para utilizar su Andadera Rollator Plegoö Travel como Silla de Ruedas tipo Traslado, despliegue sus descansapiés, siéntese cómodamente y trasládese con ayuda de un Asistente.

MANTENIMIENTO

- Limpie su Andadera Plegable periódicamente con un paño húmedo y detergente suave.
- Revise periódicamente que todas las partes estén ajustadas correctamente y que los frenos funcionen.

Su Andadera Rollator Plegoö Travel está garantizada por 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta Garantía* cubre cualquier defecto de Fabricación y Funcionamiento, así como imperfecciones de Materiales y Mano de Obra.

La Garantía NO CUBRE defectos ocasionados por Mal Uso, Abuso, Negligencia u Operación Inapropiada fuera de las Especificaciones del Producto.

*Aplican Restricciones, favor de consultar Nuestra Tabla de Garantía Limitada en nuestro sitio web: www.reactiv.com.mx