



## Andadera Rollator Plegoö KD

de Aluminio, Plegable,  
con Ruedas de 8"  
R219 144/45/46

Antes de hacer uso de su Andadera Rollator Plegoö KD lea cuidadosamente este manual. Si tiene dudas acerca de su uso contacte a su Distribuidor Autorizado ReActiv quien podrá ampliar la información.

### MEDIDAS DE SEGURIDAD

- No exceda el máximo peso permitido de 120 Kg.
- No utilice esta Rollator en escaleras o escaleras eléctricas.
- No utilice la Andadera mientras alguien más este sentado en ella.
- No la use para transportar objetos o personas como Silla de Ruedas.
- No haga uso del asiento sin colocar el respaldo tubular.
- No se sienta en la Andadera cuando la superficie donde se encuentra este inclinada.
- Utilice la Rollator como un soporte para caminar.
- Los objetos deben ser colocados en la bolsa portaobjetos y deben ser de un máximo de 5kg., no cuelgue objetos de los manerales, pues esto puede afectar la estabilidad de la Andadera.

### INSTRUCCIONES DE ENSAMBLE

- Una vez que ha comprobado que su Rollator está en perfecto estado remueva todo el plástico que la protege y deséchelo.
- Verifique que las ruedas giren sin obstrucciones.
- Revise que la canasta este fija y todos los tornillos estén apretados.
- Inserte las cuatro ruedas en la Rollator con los botones a presión.
- Instale el respaldo al marco de la Rollator.
- Despliegue la Rollator empujando hacia abajo el asiento hasta que las cuatro ruedas se encuentren completamente extendidas, puede cambiar la altura del asiento utilizando los clips ubicados en cada pata de la Andadera.
- Inserte los manerales y ajuste la altura de la Andadera de forma que cuando su brazo se encuentre relajado, la agarradera de la Andadera esté a la altura de su muñeca.
- Al usar su Rollator su codo no debe flexionarse mas de 20° a 30°.
- Verifique que los orificios del marco de la Andadera y el marco coincidan y ajuste con los tornillos proporcionados.

## RECOMENDACIONES DE USO

- Antes de utilizar su Andadera verifique que los frenos estén funcionando correctamente.
- Coloque el Andadera en una superficie plana.
- Para andar alinee la mitad de su pie con las ruedas traseras de la Andadera.
- Levante las patas traseras de la Andadera y deslícela frente a usted, descansen las ruedas de la misma en una superficie plana y avance hacia el frente.
- Cuidadosamente camine hacia adelante un paso a la vez.
- Para avanzar más lento jale suavemente ambos frenos hacia arriba.
- Para utilizar la Andadera como asiento empuje ambos frenos hacia abajo, escuchará un “clic” que le indicará cuando estén fijos, para liberarlos jale los frenos hacia arriba nuevamente.
- Para abatir el asiento completamente verifique que los topes ubicados en el tubo posterior del mismo, se encuentren liberados, de no ser así, podría dañar el asiento al forzarlo. Para liberar el asiento solo colóquelo a 90 grados de su posición horizontal y deslicelo a la izquierda, inmediatamente el asiento se abatirá en ambos sentidos sin oponer resistencia.

## MANTENIMIENTO

- Limpie su Andadera Rollator periódicamente con un paño húmedo y detergente suave.
- No la exponga al sol por mucho tiempo, ni utilice ácidos o solventes para su limpieza.
- Revise periódicamente que todas las partes estén ajustadas correctamente y que los frenos funcionan.
- Para ajustar cada freno, existen dos perillas que encontrará en cada lado de la Andadera, una en frente del freno en el maneral y la segunda en la pata trasera de la Andadera, gire la perilla al sentido de las manecillas para aflojar los frenos y al contrario para apretarlos. Para que funcionen correctamente el perno no debe tocar la rueda, pero el espacio entre el perno y la rueda debe ser de menos de 3-4 mm.

Su Andadera Rollator Plegoö KD está garantizada por 1 año a partir de la fecha de compra original. Esta Garantía\* cubre cualquier defecto de Fabricación y Funcionamiento, así como imperfecciones de Materiales y Mano de Obra. La Garantía NO CUBRE defectos ocasionados por Mal Uso, Abuso, Negligencia u Operación Inapropiada fuera de las Especificaciones del Producto.

\*Aplican Restricciones, favor de consultar Nuestra Tabla de Garantía Limitada en nuestro sitio web: [www.reactiv.com.mx](http://www.reactiv.com.mx)